


IMPORTANT ! Rappel du cycle de nettoyage obligatoire, avant utilisation de toute pièce neuve :

- *Laver avec un savon doux et une brosse chirurgical, rinçage à l'eau claire.*
- *Nettoyer en bac de décontamination ou ultrasons, rinçage à l'eau claire.*
- *Séchage*
- *Lubrification de l'instrument à l'aide d'un lubrifiant en aérosol, Miltex.*
- *Mise en sachets.*
- *Stérilisation en autoclave.*
- *Stockage.*

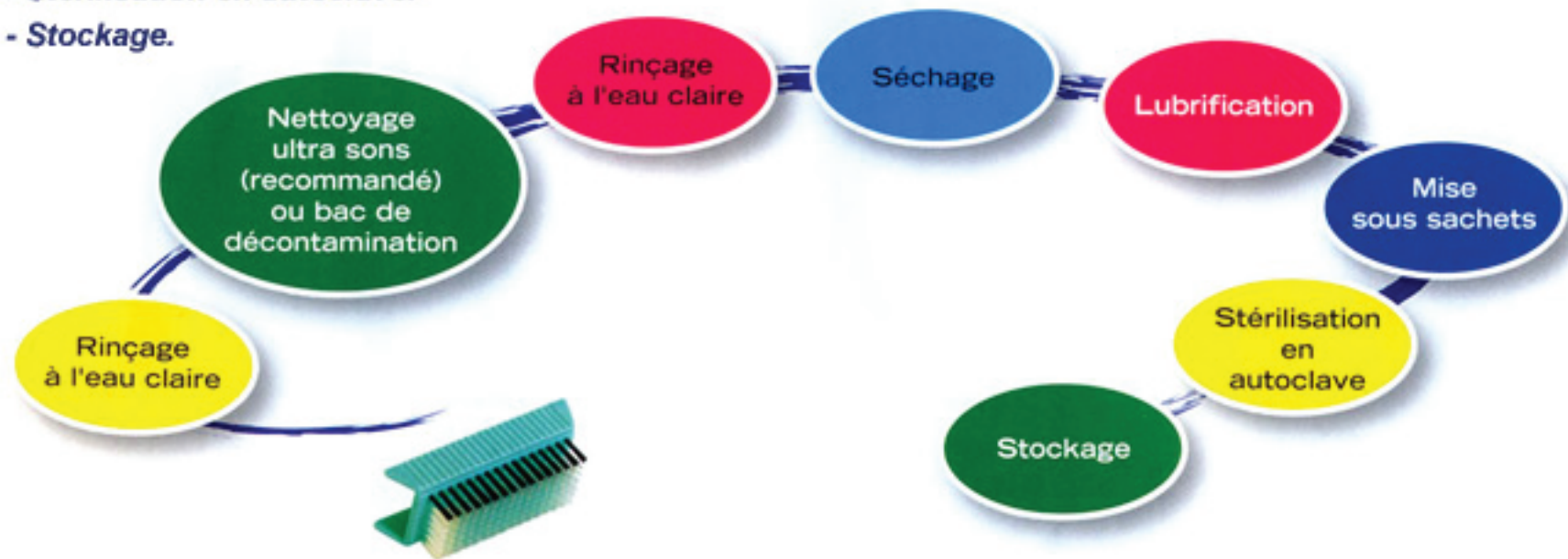

Lavage + brossage de la pince à l'aide d'un savon doux